

Insertter ST - návod na použitie

Zavádzač Dana ST

Aplikačné tlačidlo

Tlačidlo bezpečnostného zámku

Držiak kanyly

Jednoduché použitie

Bezpečný

Komfortné

Výhradne pre Soft Release ST

SOOIL

[www. Sooil.com](http://www.Sooil.com)

Vyrobené v SOOIL Development Co.,Ltd

111-1, Heukseok-dong, Dongjak-gu, Seoul, Korea/Tel : 82(2)-3463-0041/Fax: 82(2)-3463-7707

Distributor:

SOOIL,LLC : 5665 Oberlin Drive, Suite 102, San Diego, CA92121 / [Tel:1-866-747-6645](tel:1-866-747-6645)

EC/REP RSQR Ltd..Ludgate House,107-111 Fleet Street, London EC4A2AB


www.rsqu.co.uk. info@rsqa.co.uk. Tel: +44(0)207-936-9412

DANA Insertter ST (Zavádzač DANA ST)



Zavádzač nesmie byť nikdy namierený proti tvári alebo inému než odporúčanému miestu vpichu.

Jak zavádzač používať...

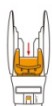

1. Stlačte **držiak kanyly** proti rukoväti. V okamžiku, kedy budete počuť "kliknutie", posuňte tlačidlo bezpečnostného zámku do polohy zamknuté.



2. Rozbaľte infúzny set Soft-Release ST.
Chyťte kryt ihly a vložte Soft-Release ST do držiaku kanyly.
Kryt ihly potom odstráňte.



3. Odlepte krytie hornej **náplaste** kanyly Soft-Release ST a položte zavádzač na požadované miesto zavedenia setu. Dodržte požadovaný uhol zavedený (odporúča sa 15° až 30°). Odomknite bezpečnostný zámok a následne pre zavedenie kanyly stlačte **aplikačné tlačidlo**.



4. Pritlačte (hornú) náplasť kanyly Soft Release ST na kožu a odstráňte zavádzač. Následne vyberte **zavádzaciu ihlu**.



5. Zľahka pridvihnite kanylu a odlepte krytie spodnej **náplasti** kanyly Soft-Release ST. Upeňovacia náplasť potom pevne pritlačte na kožu.