

Návod na použitie

Alkoholové tampóny(Alcohol Pad)

Názov produktu: Alkoholové tampóny (Alcohol Pad)



Model a špecifikácia:

D-010

Zamýšľané použitie:

Dezinfekcia len pre neporušenú pokožku. Tento produkt nie je sterilný.

Popis/Zloženie:

Výrobok sa skladá zo 70% Izopropylu, hliníkovej fólie, netkanej textílie.

Kontraindikácie:

Osoby alergické na netkané textílie nesmú produkt používať

Upozornenie a varovanie:

1. Pred použitím skontrolujte, či je obal v dobrom stave, potvrdte identifikáciu obalu, dátum výroby a dobu platnosti a použite ich počas doby platnosti.
2. Tento produkt je jednorazový a nesterilný, po použití by mal byť zlikvidovaný ako medicínsky odpad.

Metóda:

Roztrhnite balenie, ukazovák a palcom vyberte kúsok netkanej textílie s dezinfekčným prostriedkom, 2-3x utrite a vydezinfikujte pokožku, ktorú je potrebné vyčistiť, a na dosiahnutie dezinfekčného účinku nechajte pôsobiť 1-5 minút. Po použití vyhoďte použité alkoholové dezinfekčné tampóny do príslušného koša.

Skladovacie a prepravné podmienky:

Zabalené výrobky sa skladujú v čistých, tmavých, nekorozívnych a dobre vetraných priestoroch s relatívnou vlhkosťou maximálne 80 %. Podmienky prepravy musia byť v súlade s objednávkovou zmluvou a musí sa s nimi zaobchádzať opatrne, aby sa zabránilo silnému tlaku, priamemu slnečnému žiareniu, dažďu a snehu.

Expirácia:

5 rokov. Dátum výroby a dátum spotreby produktu nájdete na balení.

Výrobca:

Názov spoločnosti: Wuxi Medical Instrument Factory Co.,Ltd

Adresa: No.43 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi City, Jiangsu 214194 China

Tel: +86-510-83791818

Email: wxmedical@vip.126.com

Splnomocnený zástupca pre Európske spoločenstvo:

Názov spoločnosti: Lotus NL B.V.

Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Tel: +31644168999

Email: peter@lotusnl.com

Informácie o symboloch:

Symbol	Odkaz	Symbol	Odkaz
	Zdravotnícka pomôcka		Výrobca
	Prečítajte si návod na použitie		Jedinečný identifikátor zariadenia
	Teplotné obmedzenie		Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve
	Spotrebujte do		Uchovávať v suchu
	Kód šarže		Nepoužívajte 2 krát
	Značka zhody CE		Neobsahuje latex
	Pozor, prečítajte si spravidelné dokumenty.		Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu