


# Kedy a Ako Kalibrovat'

1x za deň (v deň zavedenia senzora 2x)



## Kedy Kalibrovat' ?

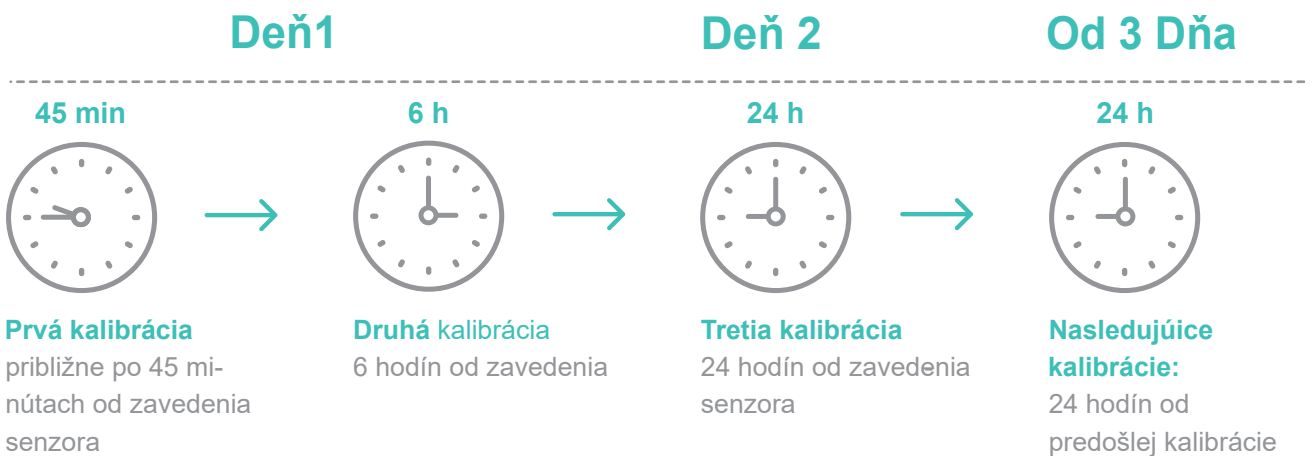

### **Dôležité:**

Po druhej kalibrácii môžete naslednú kalibráciu vykonať aj skôr, ak chcete posunúť čas kalibrácie nasledujúcich dní na vhodnejší. Napríklad, ak nasledujúca kalibrácia je naplánovaná na 23:00 môžete urobiť kalibráciu vo vhodnejší čas o 19:00. V takom prípade budete vykonávať kalibrácie nasledujúce dni vždy o 19:00 (24 hodín neskôr).

### Kritéria pre kalibráciu:

- Hodnota glykémie nameraná glukomerom nesmie byť staršia ako 5 minút.
- Nameraná glykémia musí byť v rozmedzí 3.9- 13.9 mmol/l.
- Glykémia je stabilná (horizontálna trendová šípka) alebo pomaly sa mení (mierna šípka).

# Vloženie a čítanie kalibrácie


Zmerajte si glykémiu z prsta pomocou glukomera GlucoMen Day METER, alebo pomocou akéhokoľvek glukomera.

## V Aplikácii


1 Kliknite na **HOME**.




2 Kliknite na **CALIBRATE** a postupujte podľa inštrukcií.

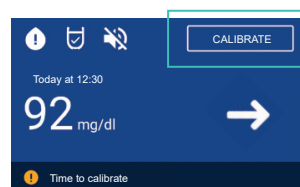


3 Glukomer GlucoMen Day METER automaticky nahrá vašu glykémiu pomocou Bluetooth do aplikácie GlucoMen Day Glykémia bude nahratá po vykonaní merania a odstránenia testovacieho prúžku z glukomera GlucoMan Day METER. Prosím potvrdte nameranú hodnotu v App kliknutím na **CONFIRM**

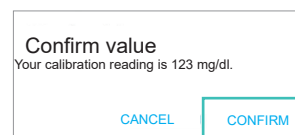

Alebo môžete nameranú hodnotu vložiť manuálne :  
Kliknutím na ikonu **NEW READING**.

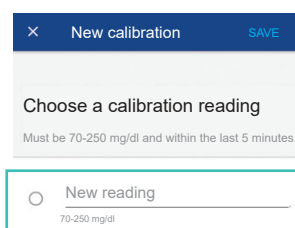

4 Kliknite na tlačidlo **SAVE**.

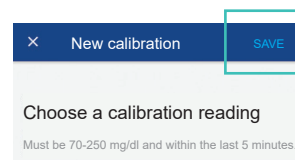

Detailnejšie informácie nájdete v priloženej príručke pre používateľa GlucoMen® Day CGM User Guide.

© 2020 A. MENARINI Diagnostics. All rights reserved.

Find more information & video tutorials on [www.glucomenday.de](http://www.glucomenday.de)

**A. MENARINI Diagnostics. Division der BERLIN-CHEMIE AG**

Glienicker Weg 125 | 12489 Berlin | Tel.: 0800-45826636 | E-Mail: [glucomenday@berlin-chemie.de](mailto:glucomenday@berlin-chemie.de)